



Instruções de Montagem

POLTRONA FIXA

✉ | E-mail: sac@docmob.com.br

☎ | +55 (11) 4118-0161

1. AVISOS

- Antes de usar, leia atentamente o manual e siga as instruções.
- Este produto e embalagem não são brinquedos, mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto destina-se apenas ao uso conforme mencionado no manual, não deve ser usado para outros fins.
- Este produto destina-se apenas a adultos, não permita que bebês ou crianças pequenas o utilizem.
- Não faça reparos, desmontagens ou modificações no aparelho, e não use acessórios não fornecidos pelo fabricante.
- Durante o transporte, instalação e uso, evite esmagar, bater ou colidir, pois isso pode danificar o produto.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Realize manutenções periódicas na maca. Verifique se todos os itens estão bem fixados e se os cabos não apresentam desgaste ou rompimento. Certifique-se de que não há trincas na estrutura de madeira.
- Não exceda o limite de peso recomendado. Isso pode causar acidentes graves ao usuário e ao cliente.
- Não utilize produtos de limpeza à base de álcool no estofamento em vinil. Isso pode danificar o material. Utilize água morna com sabão neutro e seque bem.
- Assegure-se de que os quatro pés da maca estejam sobre uma superfície plana e nivelada antes de utilizá-la.

3. APRESENTAÇÃO

Agradecemos por adquirir a **POLTRONA FIXA DOCMOB**


Recomendamos a leitura atenta deste manual para garantir a montagem correta e segura do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu representante comercial.

A equipe **DOCMOB** permanece à disposição para prestar esclarecimentos e receber suas considerações.




Para assistir ao vídeo de montagem, escaneie o **QR Code** acima e acompanhe o passo a passo completo para garantir a instalação correta do produto.


2. ITENS INCLUSOS

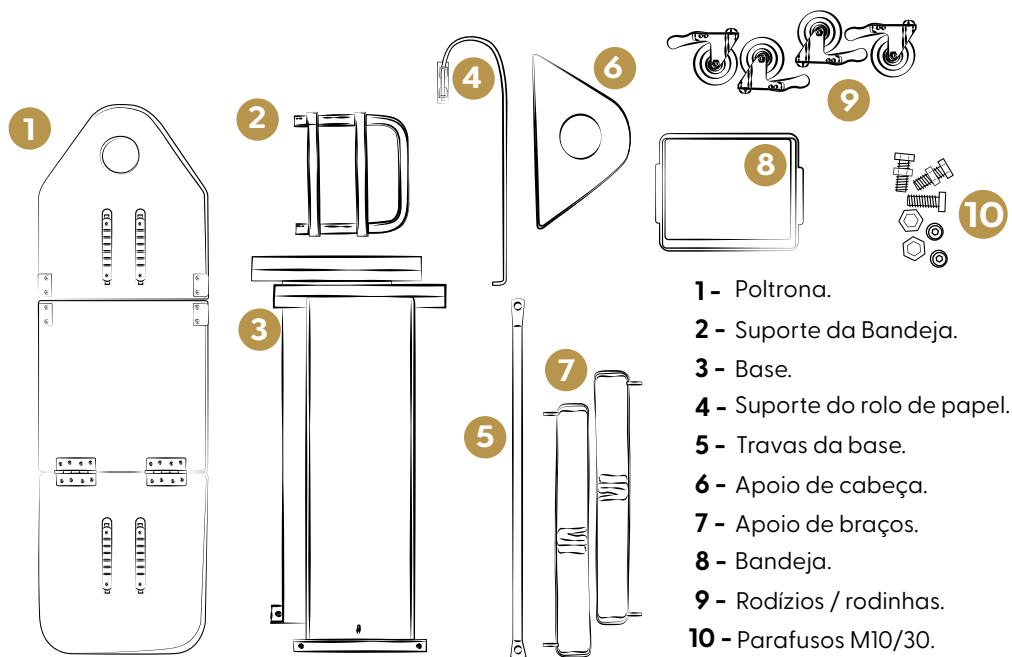

3. MONTAGEM

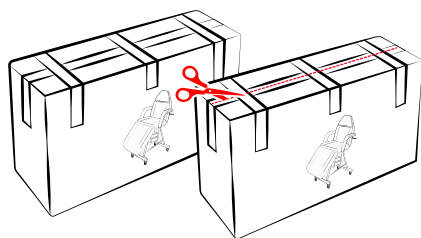

Ao receber o produto é indicado ter um espaço mínimo de 3 x 3 metros, para que a montagem seja realizada de forma correta e confortável ao montador, indicamos também que o trabalho seja realizado por duas pessoas, pois consideramos o nível de dificuldade da montagem da **POLTRONA FIXA** como médio.


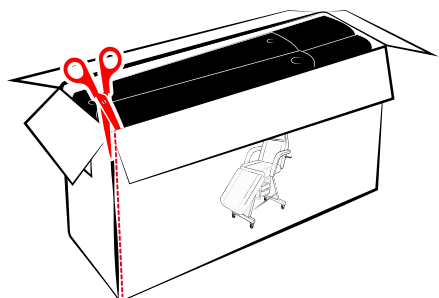


Utilize um estilete ou uma tesoura, com cautela, para romper a fita plástica responsável pelo lacre da embalagem.



Utilize, com cautela, um estilete ou uma tesoura para realizar o corte nas quatro laterais da embalagem, certificando-se de não danificar o produto. Recomendamos utilizar a própria embalagem como forro no chão, a fim de evitar riscos ou avarias durante o processo de montagem.


Deixe a Poltrona (1), posicionada para baixo, deixando os parafusos do fundo a vista, retire os parafusos fixados na mesma posição a base (3), e fixe utilizando os mesmos parafusos retirados anteriormente.

Repita o mesmo procedimento com os parafusos centralizados para fazer a fixação do suporte de bandejas (2). Haverá a barra de trava do suporte que precisa ser fixado ao final havendo a união do suporte.

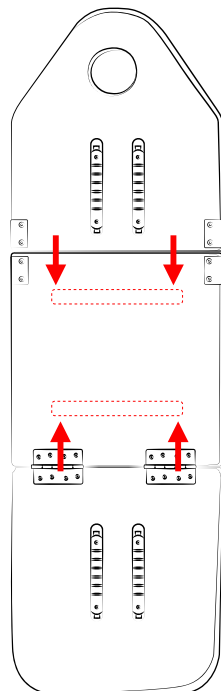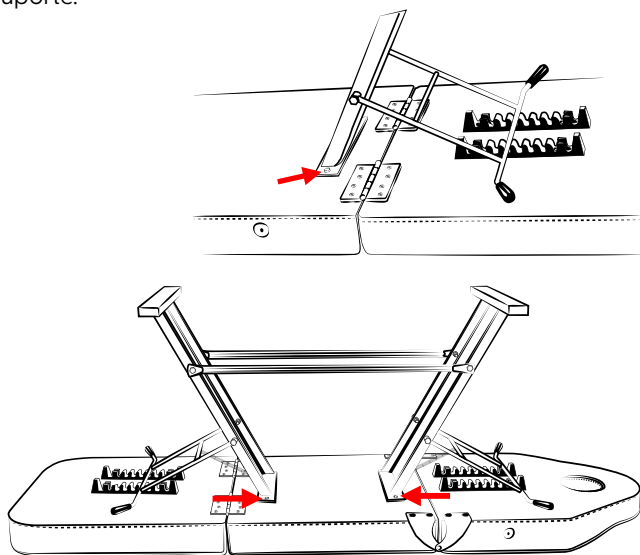



As travas da base (5) devem ser fixadas nas laterais da estrutura, uma de cada lado. Utilize dois parafusos de cabeça sextavada M10 x 30 mm (10) para cada fixação. Em seguida, prenda as molas das travas.

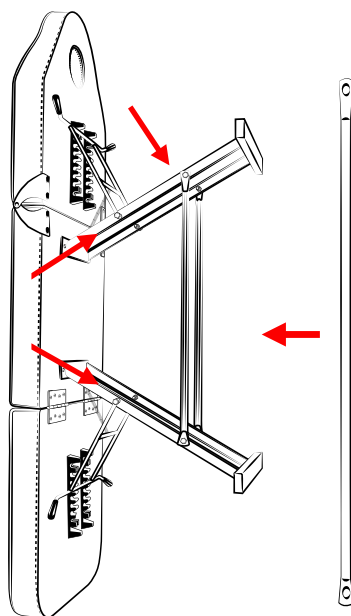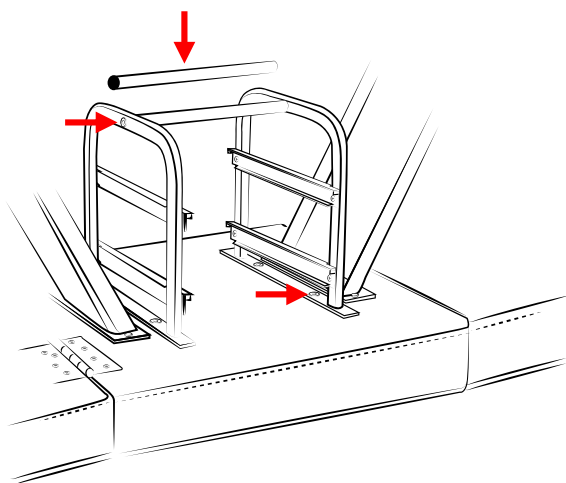

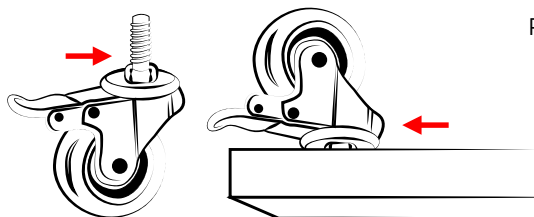


Rosqueie os 4 rodízios (9) na base e trave-os.


Observe que o suporte para rolo de papel (4) deve ser inserido na base e fixado com o parafuso localizado no próprio suporte.

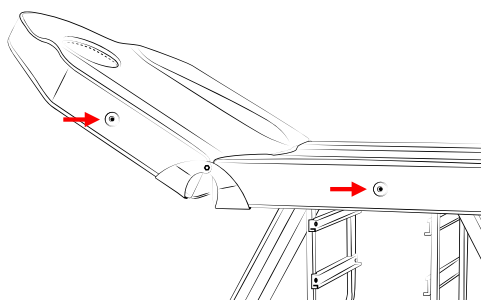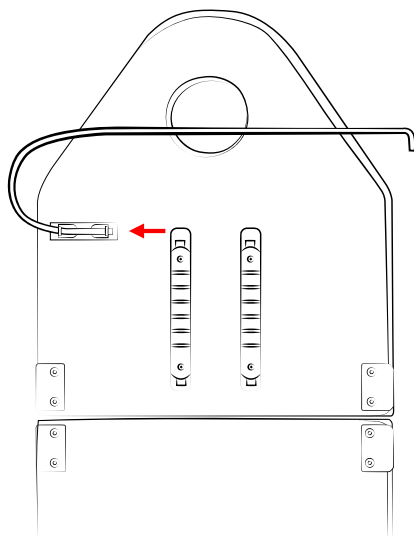

Certifique-se de que os rodízios estão travados e vire a poltrona, posicionando-a corretamente para o uso.

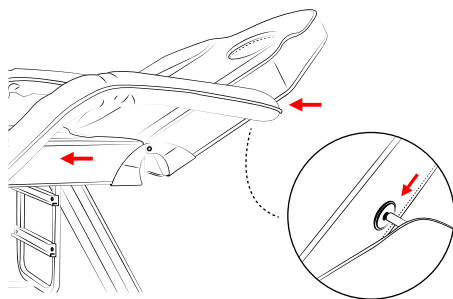

Note que, em suas laterais, há entradas onde serão encaixados os apoios de braço (7).

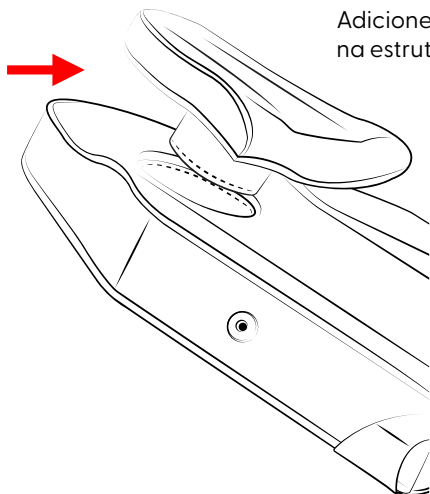

Adicione o apoio de cabeça (6), assegurando o encaixe correto na estrutura.



IMPORTANTE: Os apoios de braço desta poltrona foram projetados exclusivamente para proporcionar conforto ao paciente durante o uso, servindo apenas como suporte para o descanso dos braços. Não devem ser utilizados como ponto de apoio ou ancoragem para subir, descer ou movimentar-se na poltrona, a fim de evitar danos ao equipamento e garantir a segurança do(a) usuário(a).

MONTAGEM FINALIZADA:



4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas ou eventuais problemas, nossa equipe de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição para prestar todo o suporte necessário. Conte conosco para assegurar sua plena satisfação com este produto.



E-mail: sac@docmob.com.br



+55 (11) 4118-0161

5. DADOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIÇÃO
Peso total da poltrona montada	31Kg
Peso máximo suportado	120Kg
Cores	Creme / Preto
Braços	Apenas para conforto

6. CUIDADOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA POLTRONA

Manter a poltrona limpa é essencial para preservar sua aparência e garantir maior durabilidade ao longo do tempo.

RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA:

- Utilize um pano macio umedecido com solução de detergente neutro diluído em água;
- Remova o excesso de líquido do pano antes de aplicá-lo na superfície da poltrona;
- Após a limpeza, utilize outro pano limpo, levemente umedecido com água, para retirar possíveis resíduos de detergente;
- Finalize com um pano seco ou toalhas de papel descartáveis, garantindo a secagem completa do estofado.

ATENÇÃO:

- Não utilize produtos químicos com agentes abrasivos, decapantes ou compostos como cloro, ácido peracético, formaldeído ou similares, pois podem danificar o revestimento da poltrona;
- Nunca jogue água diretamente sobre a poltrona;
- A vida útil do produto está diretamente relacionada à limpeza correta, especialmente à secagem adequada após cada procedimento;
- Evite a exposição direta à luz solar, pois isso pode comprometer a integridade do material.



7. ITENS DE MONTAGEM

QTD	ITEM	QTD	ITEM
1	Poltrona	4	Rodinhas
2	Suporte da bandeja	4	Parafusos 3/8" x 30mm sextavado
1	Base	2	Molas diâmetro 14mm x 118mm
4	Suporte rolo de papel	1	Chave de boca 9mm
2	Travas da base	1	Chave de boca 17
1	Apoio de cabeça	4	Porcas sextavadas M10
2	Apoio de Braço	1	Chave Allen n° 5
2	Bandeja	1	Chave Allen n° 4

8. GARANTIA

A sua poltrona foi desenvolvida com rigoroso controle de qualidade, visando oferecer conforto, praticidade e estética no seu dia a dia de atendimentos. Pensando nisso, oferecemos uma garantia de **3 (três) meses** a partir da data de compra, cobrindo eventuais defeitos de fabricação.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais. O prazo inicia-se na data da compra comprovada pela Nota Fiscal (de compra) do produto. Para efeito de prestação de serviço em garantia ou troca do produto, deverá ser apresentado juntamente com o produto, a cópia da Nota Fiscal.

A garantia será automaticamente invalidada caso a poltrona:

- Seja utilizada em desacordo com as especificações técnicas descritas neste manual;
- Sofra modificações mecânicas ou estéticas que alterem suas características originais;
- Seja exposta excessivamente à umidade ou a produtos químicos inadequados;
- Apresente sinais internos ou externos de impactos, quedas ou uso indevido;
- Seja consertada ou modificada por pessoa ou técnico não autorizado.

EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE ESTAMOS AQUI PARA TE AJUDAR!



Para assistir ao vídeo de montagem, escaneie o **QR Code** acima e acompanhe o passo a passo completo para garantir a instalação correta do produto.

POLTRONA FIXA

✉ | E-mail: sac@docmob.com.br

☎ | +55 (11) 4118-0161

Avenida 4-IM, 30 - Parque Industrial Margarete - CEP 13505-813 - Rio Claro / SP

Tel./Fax (11) 41180161 CNPJ: 23.884.078/0001-11 IE: 587.225.440.110

Resp. Técnico: Luís Henrique Pires de Andrade - CREFITO/SP: 233110-F