

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA



Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

Prezado usuário, **parabéns por adquirir a POLTRONA HIDRAULICA da SMART GR.** Leia o manual cuidadosamente para a montagem correta do produto e em caso de dúvidas, entre em contato com o seu representante comercial.

Nós da **SMART GR** estamos à disposição para solucionar dúvidas e ouvir sua opinião.

| ITENS INCLUSOS

- 1 - Poltrona.
- 2 - Base.
- 3 - Travas e acessórios.
- 4 - Hidráulico.



MONTAGEM |

Ao receber o produto é indicado ter um espaço mínimo de 3 x 3 metros, para que a montagem seja realizada de forma correta e confortável ao montador, indicamos também que o trabalho seja realizado por duas pessoas, pois consideramos o nível de dificuldade da montagem da POLTRONA HIDRÁULICA como médio. O seu produto está dividido em 4 (quatro) embalagens, siga atentamente os passos a seguir para a montagem correta do mesmo.


Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA



Com o auxílio de um estilete ou uma tesoura, rompa a fita plástica que faz o fechamento da embalagem. Cuidadosamente, o corte nas 4 laterais da embalagem (2), se atentando para que não danifique o produto. Utilize a embalagem para forrar o chão, evitando danificar o produto no momento da montagem.


Deixe a base (2), posicionada para baixo, facilitando assim a instalação dos rodízios presentes na embalagem de Travas e acessórios (3).

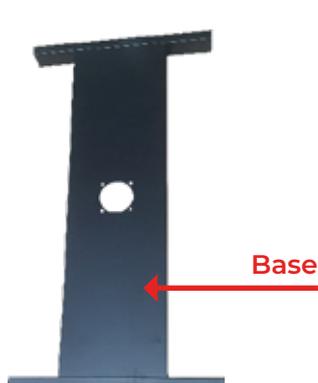


Cuidadosamente, corte nas 4 laterais da embalagem (4), retire o Hidráulico de sua embalagem e deixe próximo a base. Dentro da embalagem (3), encontrará 4 porcas M6, as mesmas serão utilizadas para fixar o HIDRAULICO a BASE. Com o auxílio de um ajudante, deixe a BASE em posição lateral e introduza o Hidráulico a posição central da BASE.

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

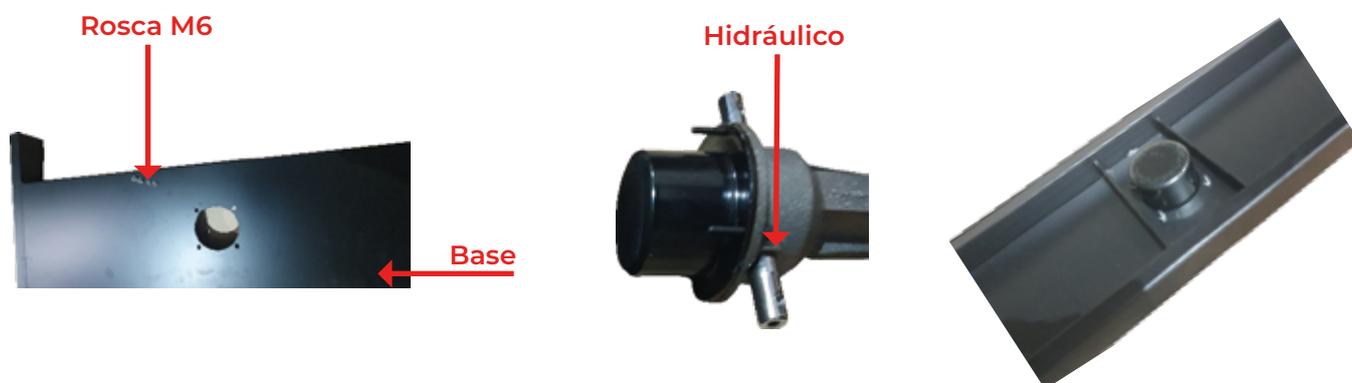

Atente-se de deixar o acionador do Hidráulico paralelo a BASE, para que possa ser instalado o impulsor.

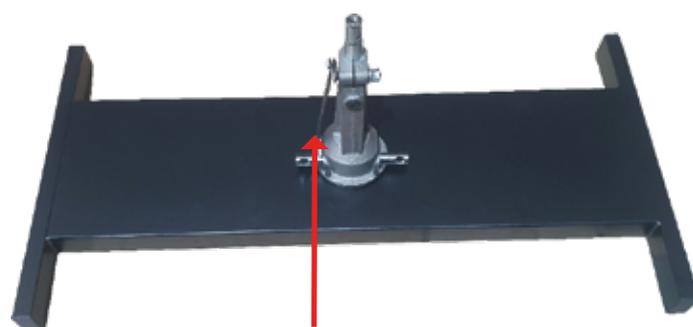

Introduza a capa de proteção sobre o HIDRÁULICO, notará que em seu superior possui um furo, o mesmo servirá de trava para a capa de proteção e o Hidráulico.



Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

No Hidráulico possui 1(um) parafuso Allen de cada lado do acionador, com a chave Allen enviada junto ao KIT desrosqueei-os ao ponto de conseguir introduzir o impulsor, ao fazer isso, rasquei-os novamente para que o impulsor fique preso.




Impulsor



Pino trava da capa de proteção do hidráulico

No topo do eixo do HIDRÁULICO possui uma cavidade onde será introduzido o PINO TRAVA (3).

Na embalagem (3), encontrará a BASE POLTRONA, em sua parte inferior notará o local onde o eixo do HIDRÁULICO será encaixado e o local onde o PINO TRAVA precisará ficar posicionado.

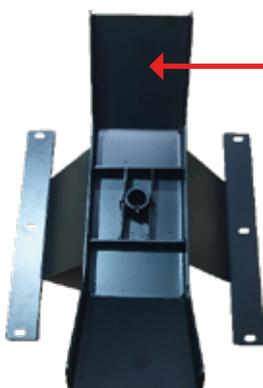

Base Poltrona



Encaixe do hidráulico

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA



Ao posicionar o mesmo, em seu superior notará um furo central onde será encaixado o parafuso de trava. Ao chegar a este ponto reserve a montagem, pois acaba de finalizar a primeira etapa da montagem e precisará do espaço para iniciar a segunda etapa.

Cuidadosamente, corte nas 4 laterais da embalagem (1), se atentando para que não danifique o produto. Utilize a embalagem para forrar o chão, evitando danificar o produto no momento da montagem. Posicione a poltrona virada para baixo, para que seja iniciado a montagem. Iniciaremos com a fixação dos suportes para o posicionador tanto da LOMBAR quando das PERNAS encontradas dentro da embalagem (3). Note que há um par maior que o outro. O par maior é fixado na poltrona referente a lombar e o menor referente as pernas.


ATENÇÃO: Os suportes dos posicionadores possuem uma leve inclinação em seus dentes de ajustes, ambos precisam estar voltados para o centro da poltrona, caso seja montado de forma errônea, as mesmas não farão a trava de forma correta, ao se adicionar peso a mesma se soltará provocando acidente!



Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

Dentro da embalagem (3) encontrará o articulador, o mesmo será fixado por parafusos entre a parte central e a parte Dorsal da Poltrona, irá uma peça de cada lado da POLTRONA.

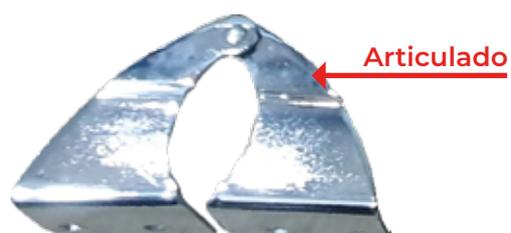

Com o auxílio de um ajudante, posicione a MONTAGEM 1, sobre a Poltrona, a mesma possui 6 furos para que sejam fixados os parafusos.



Montagem 1




Ao finalizar a fixação da MONTAGEM 1, com a POLTRONA. Rotacione a MONTAGEM 1, para que ela fique perpendicular a POLTRONA, para que facilite a instalação das TRAVAS DE POSICIONAMENTO.

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

Na embalagem (3) encontrará 2 TRAVAS DE POSICIONAMENTO. As mesmas serão responsáveis pelo posicionamento do Dorso e das pernas do paciente. Na embalagem (3) encontrará 4 parafusos sextavado M10 x 40. Os mesmos farão a fixação das TRAVAS DE POSICIONAMENTO e a POLTRONA.


Na embalagem (3) encontrará duas barras metálicas que serão fixadas sobre a Base referente ao Dorso. Deixando a trava presa, para que não corra o risco de escapar. Os parafusos para esta fixação serão encontrados na embalagem (3), parafuso Philips tarraxante.

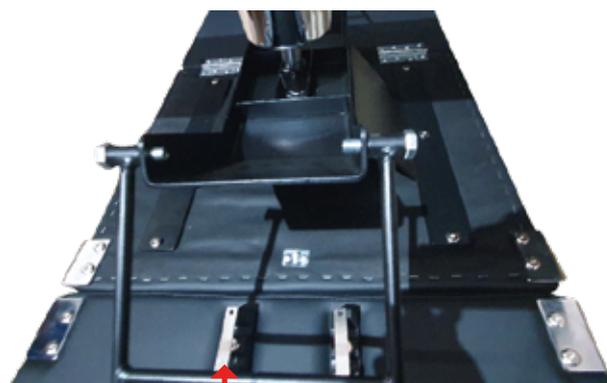

Trava de posicionamento



Na embalagem 3 encontrará duas molas, com tamanhos diferentes, a de maior tamanho será responsável pelas pernas e a menor para o dorsal.

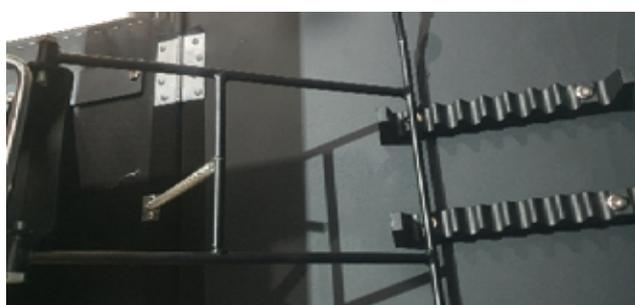

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA


Atenção: Para maior facilidade, solicite ajuda para que seja dobrado o dorsal, para que não seja necessária tanta força para encaixar a mola menor.

Na embalagem (3) encontrará o suporte de papel, o mesmo será encaixado na parte posterior da poltrona, e sua trava será feito por um pino flexível.



Suporte de papel

Com o auxílio de um ajudante trave os rodízios e posicione a poltrona na posição de utilização.

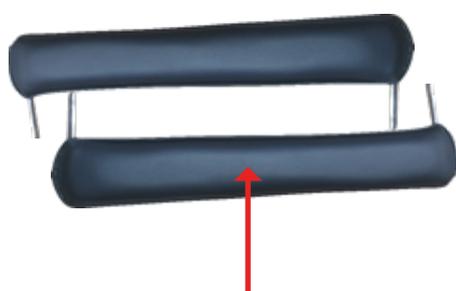

Suporte de braço



Na embalagem (3), encontrará os SUPORTES DE BRAÇO. Introduza-os na lateral da Poltrona, note que há diferença entre o lado direito e esquerdo.

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA



Introduza o APOIO DE
CABEÇA a poltrona.



MONTAGEM
FINALIZADA.

Manual de montagem

POLTRONA HIDRÁULICA

| SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Se você encontrar algum problema ou tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Estamos aqui para ajudar a garantir sua total satisfação com nosso produto.



sac@docmob.com.br



(11) 4118-0161

