



Instruções de Montagem

MACA DOBRÁVEL

✉ | E-mail: sac@docmob.com.br

☎ | +55 (11) 4118-0161

1. AVISOS

- Antes de usar, leia atentamente o manual e siga as instruções.
- Este produto e embalagem não são brinquedos, mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto destina-se apenas ao uso conforme mencionado no manual, não deve ser usado para outros fins.
- Este produto destina-se apenas a adultos, não permita que bebês ou crianças pequenas o utilizem.
- Não faça reparos, desmontagens ou modificações no aparelho, e não use acessórios não fornecidos pelo fabricante.
- Durante o transporte, instalação e uso, evite esmagar, bater ou colidir, pois isso pode danificar o produto.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Realize manutenções periódicas na maca. Verifique se todos os itens estão bem fixados e se os cabos não apresentam desgaste ou rompimento. Certifique-se de que não há trincas na estrutura de madeira.
- Não exceda o limite de peso recomendado. Isso pode causar acidentes graves ao usuário e ao cliente.
- Não utilize produtos de limpeza à base de álcool no estofamento em vinil. Isso pode danificar o material. Utilize água morna com sabão neutro e seque bem.
- Assegure-se de que os quatro pés da maca estejam sobre uma superfície plana e nivelada antes de utilizá-la.

3. APRESENTAÇÃO

Agradecemos por adquirir a **MACA DOBRÁVEL DOCMOB**

Recomendamos a leitura atenta deste manual para garantir a montagem correta e segura do produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu representante comercial.

A equipe **DOCMOB** permanece à disposição para prestar esclarecimentos e receber suas considerações.



Para assistir ao vídeo de montagem, escaneie o **QR Code** acima e acompanhe o passo a passo completo para garantir a instalação correta do produto.

4. MONTAGEM DA MACA

1. Coloque a Maca apoiada lateralmente em uma superfície plana. Destrave as fivelas de segurança, abra a maca parcialmente e remova todos os acessórios armazenados no interior (FIGURA 1).
2. Posicione-se na parte traseira da Maca, segure firmemente as duas alças laterais e inicie a abertura aplicando um movimento controlado para fora. À medida que as laterais se afastam, as pernas se desdobram automaticamente até atingirem a posição de travamento, garantindo a estabilidade da maca para uso (FIGURA 2).

⚠ ATENÇÃO: Verifique a altura dos pés da maca antes de seguir para o próximo passo

3. Vire a maca para a posição de uso, segurando-a firmemente pelo centro da estrutura e levantando-a até que fique completamente aberta e apoiada no chão.
4. Pressione levemente no centro da superfície para garantir que ela esteja totalmente nivelada e estável. Se perceber qualquer elevação no meio da maca, verifique os cabos de sustentação, localizados na parte inferior. Certifique-se de que estejam bem esticados, alinhados e sem torções. Ajuste-os conforme necessário até que a maca fique perfeitamente plana e segura para uso.

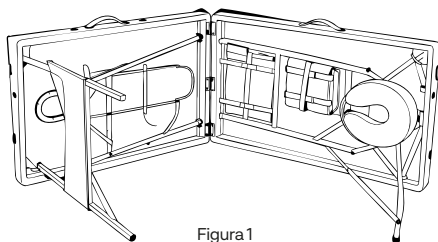


Figura 1

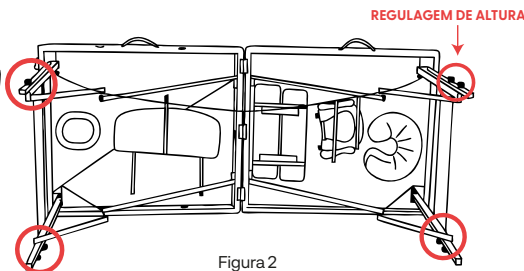



Figura 2

5. APOIO DE CABEÇA

O apoio de cabeça é composto por uma base em formato de meia-lua e uma almofada facial no mesmo formato. Sua função é oferecer suporte adequado para a cabeça e o rosto, garantindo conforto e estabilidade durante o uso (FIGURA 3).

A base ajustável permite regular facilmente o ângulo e a altura, por meio da alavanca localizada no mecanismo de ajuste. (FIGURA 4).

⚠ ATENÇÃO: Em caso do parafuso central do apoio de cabeça esteja com folga, aperte-o com uma chave allen 5 mm para que a alavanca da trava faça sua função normalmente.

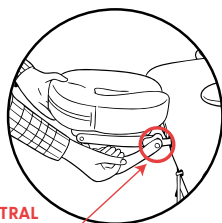

PARAFUSO CENTRAL
DO APOIO DE CABEÇA

Figura 3

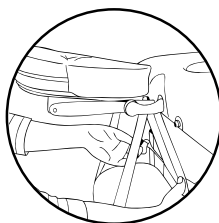


Figura 4

6. APOIO DE BRAÇO AJUSTÁVEL

O apoio de braço ajustável foi desenvolvido para sustentar os braços do cliente na parte frontal da maca. Para instalar, encaixe-o nas duas hastes do suporte de cabeça e deslize a cinta de regulagem para cima ou para baixo, ajustando à altura desejada para maior conforto. (FIGURA 5).

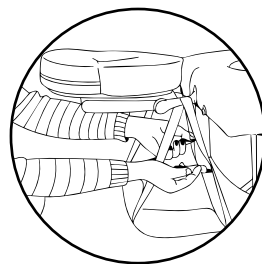


Figura 5

7. REGULAGEM DE ALTURA

A altura correta da maca deve ser ajustada de acordo com a estatura do profissional e a técnica utilizada. Para isso, remova a manopla de ajuste localizada em cada perna da maca, deslize a perna telescópica até que os furos da estrutura fiquem alinhados na altura desejada e, em seguida, recoloque e aperte firmemente as manoplas para garantir total segurança, estabilidade e nivelamento da maca.

8. LIMITE DE PESO

A maca suporta a capacidade estática máxima até 250 kg. Posicione o cliente no centro da maca para garantir a distribuição uniforme do peso e a estabilidade do equipamento. O peso de trabalho corresponde à soma do peso do cliente e à pressão máxima exercida verticalmente pelo profissional durante o uso. Devido ao aumento do esforço causado por pressões aplicadas em ângulo lateral, a pressão lateral máxima não deve exceder 50% da pressão vertical máxima segura.

ATENÇÃO: NUNCA exceda o limite de peso de trabalho indicado para a maca.

O não cumprimento dessa recomendação pode causar acidentes, lesões graves e danos estruturais permanentes ao equipamento.

9. ARMAZENAMENTO

Ao guardar a maca, fixe a base do apoio de cabeça e a almofada facial no elástico localizado na parte inferior da estrutura, conforme indicado. Guarde todos os acessórios em seus compartimentos originais. Utilize sempre a bolsa de transporte fornecida para proteger a maca durante o transporte ou armazenamento. Quando não estiver em uso, mantenha a maca em um local seco, fresco e protegido da luz solar direta. Evite expor o produto a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas) ou a ambientes úmidos.

10. LIMPEZA DIÁRIA

Remova sujeiras e resíduos do dia a dia utilizando uma solução de sabão neutro e água morna. Em seguida, seque com um pano macio e que não solte fiapos.

11. DESINFECÇÃO

Sempre que necessário, higienize o estofamento com um desinfetante hospitalar à base de isopropanol, aprovado para uso em vinil de poliuretano.

12. DESINFECÇÃO

Sempre que necessário, higienize o estofamento com um desinfetante hospitalar à base de isopropanol, aprovado para uso em vinil de poliuretano.

13. REMOÇÃO DE MANCHAS

Manchas leves podem ser removidas com um limpador suave, não abrasivo. Aplique o produto em um pano levemente umedecido e limpe suavemente a superfície. Enxágue bem com um pano úmido e finalize secando com um pano macio e sem fiapos. Para manchas mais resistentes, recomenda-se a limpeza profissional.

ATENÇÃO: Nunca utilize produtos abrasivos, solventes, álcool puro ou qualquer químico agressivo, pois podem danificar o estofamento. Evite também o uso de produtos que prometem proteger o vinil, pois podem comprometer a durabilidade do material.

14. CUIDADOS COM A ESTRUTURA

Sua maca de massagem é fabricada com madeira de alta qualidade e acabamento em verniz, que não exige cuidados especiais. Se desejar, pode ser feita uma limpeza ocasional com produtos próprios para conservação de madeira. Mantenha a maca sempre seca e protegida da umidade. Caso a maca entre em contato com líquidos, seque imediatamente com um pano macio. Evite exposição a ambientes muito úmidos ou diretamente ao sol, assim como temperaturas extremas.

15. GARANTIA

A sua Maca foi desenvolvida com rigoroso controle de qualidade, visando oferecer conforto, praticidade e estética no seu dia a dia de atendimentos.

Pensando nisso, oferecemos uma garantia de **3 (três) meses** a partir da data de compra, cobrindo eventuais defeitos de fabricação.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais.

O prazo inicia-se na data da compra comprovada pela Nota Fiscal (de compra) do produto.

Para efeito de prestação de serviço em garantia ou troca do produto, deverá ser apresentado juntamente com o produto, a cópia da Nota Fiscal.

A garantia será automaticamente invalidada caso a Maca:

- Seja utilizada em desacordo com as especificações técnicas descritas neste manual;
- Sofra modificações mecânicas ou estéticas que alterem suas características originais;
- Seja exposta excessivamente à umidade ou a produtos químicos inadequados;
- Apresente sinais internos ou externos de impactos, quedas ou uso indevido;
- Seja consertada ou modificada por pessoa ou técnico não autorizado.

**EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE.
ESTAMOS AQUI PARA TE AJUDAR!**



| E-mail: sac@docmob.com.br



| +55 (11) 4118-0161



Mobiliários inteligentes
para todo profissional





Para assistir ao vídeo de montagem, escaneie o **QR Code** acima e acompanhe o passo a passo completo para garantir a instalação correta do produto.

MACA DOBRÁVEL

✉ | E-mail: sac@docmob.com.br

☎ | +55 (11) 4118-0161

Avenida 4-IM, 30 - Parque Industrial Margarete - CEP 13505-813 - Rio Claro / SP
Tel./Fax (11) 41180161 CNPJ: 23.884.078/0001-11 IE: 587.225.440.110
Resp. Técnico: Luís Henrique Pires de Andrade - CREFITO/SP: 233110-F